

M E D I K I T G U I D I N G C A T H E T E R

セルリアン Cerulean DD6

メディキットガイディングカテーテルMH

Ceruleanに0.072inch
登 場




メディキット株式会社

セルリアン Cerulean DD6


メディキットガイディングカテーテルMH

- 各種adjunctive techniqueを行える0.072inchの広い内腔
- 先端のスーパーソフト部が屈曲した血管への高い追従性を実現
- マイクロカテーテルを高位でサポートし症例をサポート


■ 製品概要

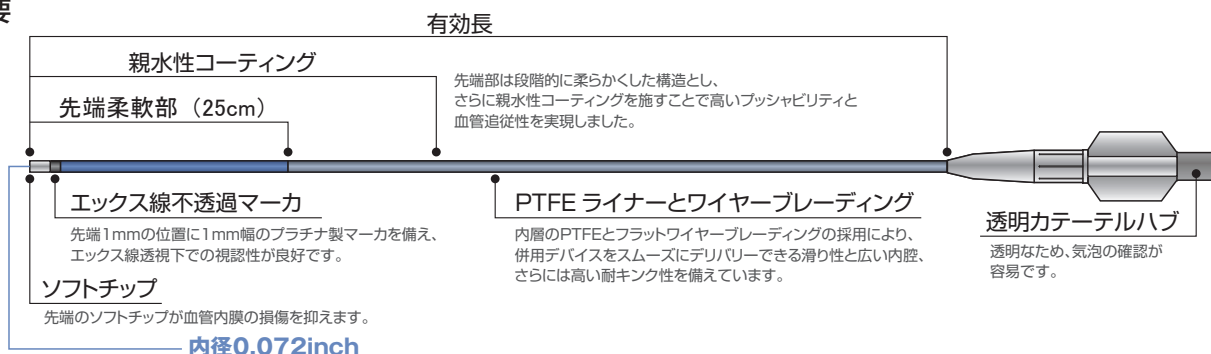


■ 症 例

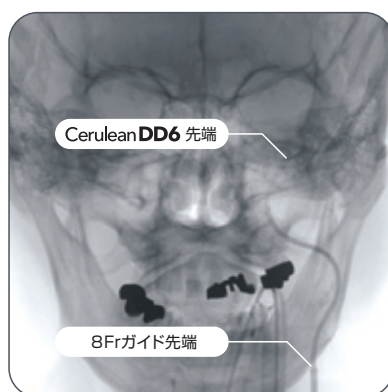

写真提供:新潟大学医歯学総合病院 脳神経外科

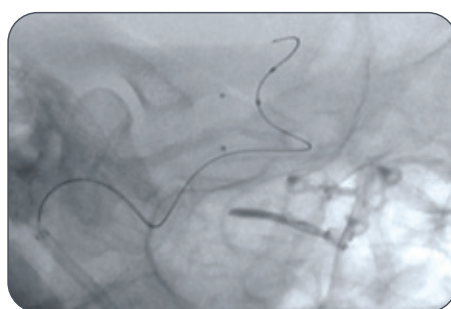

右内頸動脈未破裂動脈瘤。broad neckでballoon assistを予定。頸動脈分岐近くに8Frガイディングカテーテル(80cm)を留置し、同カテーテルを通してセルリアンDD6を内頸動脈錐体部近位まで留置。セルリアンDD6を通して動脈瘤の頸部にマイクロバルーンを留置し、マイクロカテーテルを動脈瘤内に留置。マイクロカテーテルやバルーンの操作性は良好で、問題なく塞栓術を行っている。

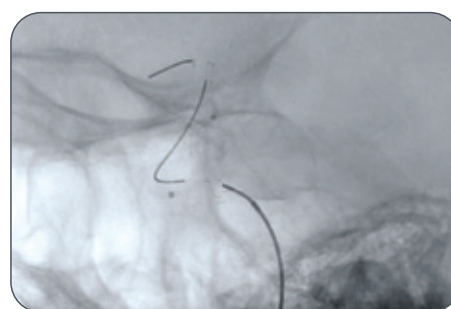

左未破裂内頸動脈瘤。ステントアシストコイル塞栓術を予定。8Frガイディングカテーテルを左総頸動脈分岐部近傍に留置し、同カテーテルを通してセルリアンDD6を内頸動脈錐体部近位まで留置。セルリアンDD6を通して、ステントアシスト用マイクロカテーテルをM1まで留置し、マイクロカテーテルを動脈瘤に留置。マイクロカテーテルをjailingしてステントをスムーズに留置可能であった。

■ 製品規格表

セルリアンDD6 (6Fr)

製品コード	品 番	外径	内 径	先端形状	有効長	全長	JAN コード
		(mm/inch)	(mm/inch)		(cm)	(cm)	
OB1108	AO60BG0.17G (M)	2.06/0.082	1.83/0.072	ストレート	113	118	4543527204453

販 売 名: メディキットガイディングカテーテル MH
 承認番号: 21500BZZ00336000
 保険医療材料請求分類: ガイディングカテーテル (3) 脳血管用

セルリアンDD6用

製品コード	品 番	外径	内 径	先端形状	有効長	全長	JAN コード
		(mm/inch)	(mm/inch)		(cm)	(cm)	
OB1107	AO40BG0.19G	1.40/0.055	1.02/0.040	ストレート	133	137	4543527204446

販 売 名: メディキットガイディングカテーテル MH
 承認番号: 21500BZZ00336000
 保険医療材料請求分類: ガイディングカテーテル (3) 脳血管用

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発 売 元: メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
 製造販売元: 東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
 営 業 所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
 流通倉庫/宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>