


メディキットガイディングカテーテルMH

セルリアン G

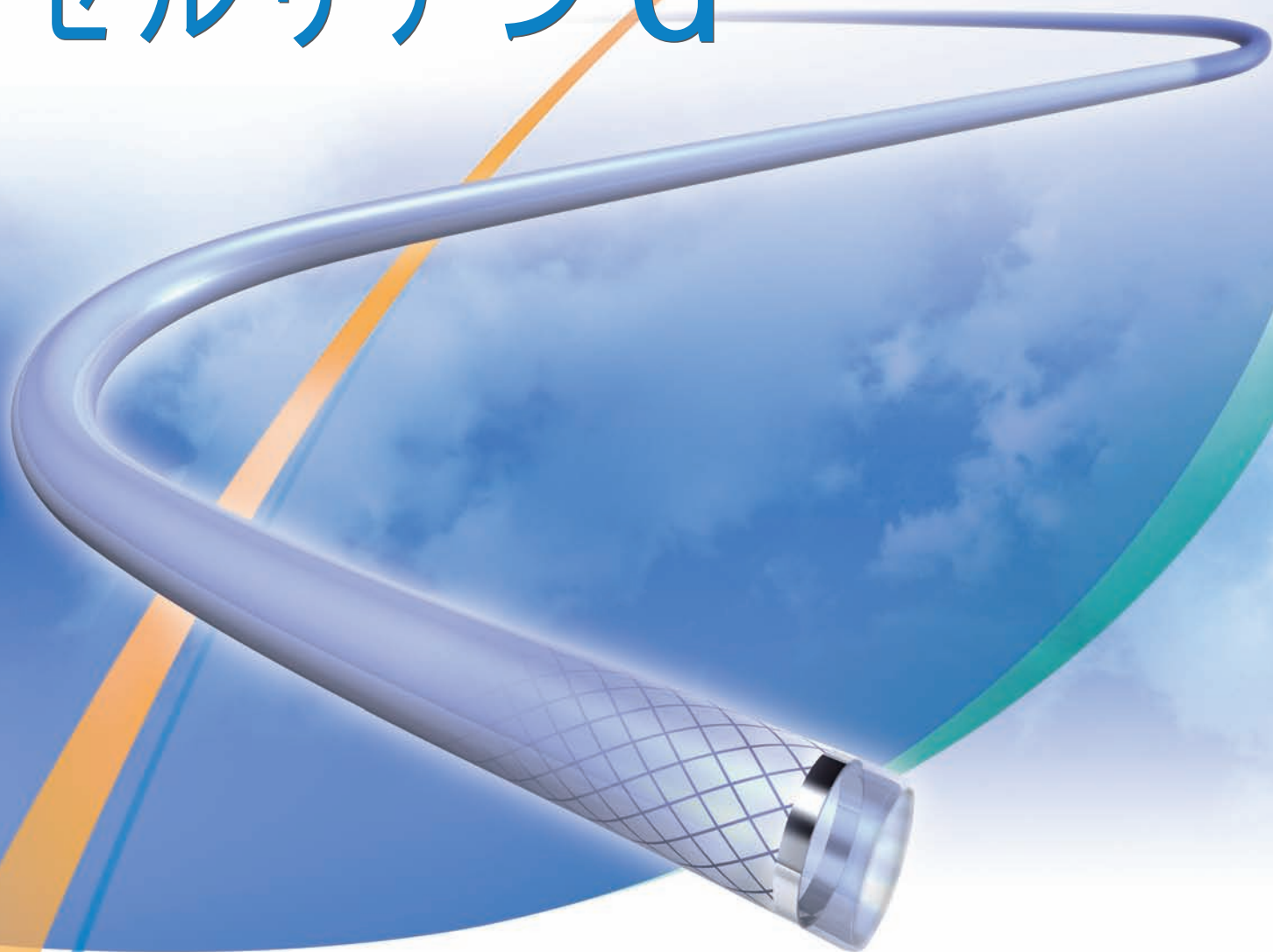


- — マイクロカテーテルのサポートに適したガイディングカテーテル
- — カテーテルは全長にわたって5段階に柔らかくし、高い追従性を実現
- — 先端から1mmの位置に0.5mmのX線不透過マーカ―を有し、視認性が良好



メディキット株式会社

セルリアン G

■ 特 長

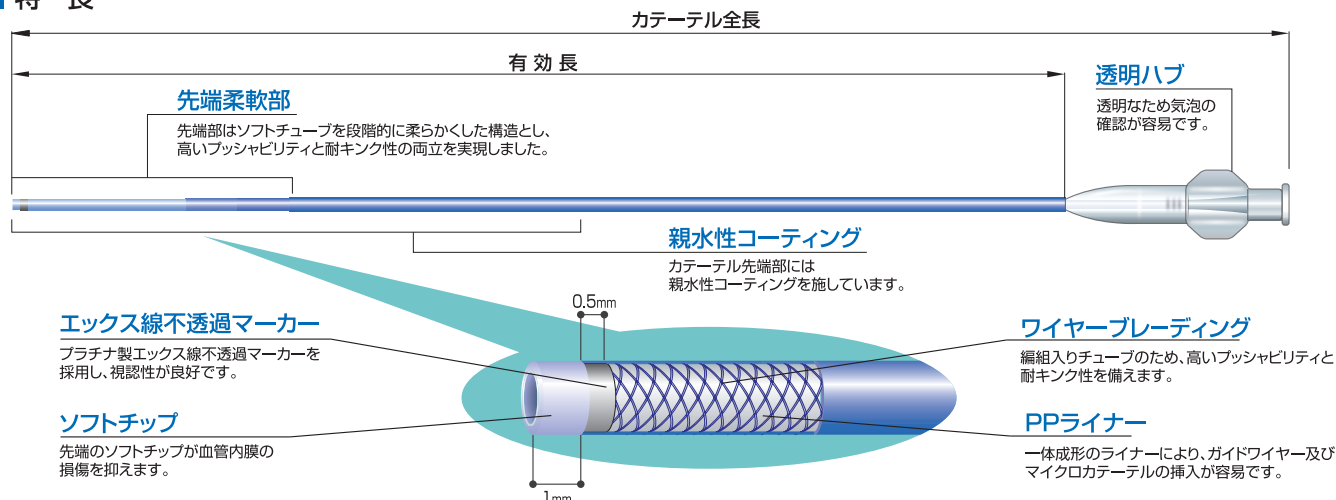

■ 症 例


中大脳動脈瘤

セルリアンG40をマイクロカテーテルのバックアップ用として使用し、マイクロカテーテルを中大脳動脈に留置して電気式離脱型コイルによる瘤内塞栓術を実施。

セルリアンG先端

ガイディングカテーテル先端

写真提供：虎の門病院 脳神経血管内治療科

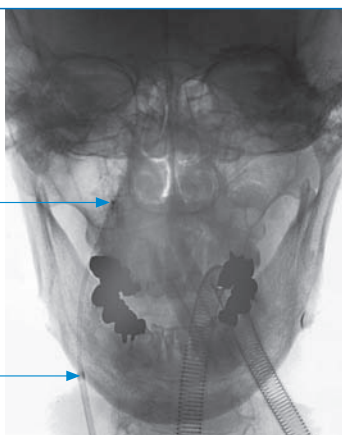

■ その他の使用例

● 小児のIVR(コイリング)を行う場合

4Fr造影カテーテルをガイディングカテーテルの代替として使用する場合に、セルリアンG40を使用すると先端の視認性、追従性、バックアップ性の向上があり、有用です。

● 脳動脈瘤塞栓、脳血管AVM等の症例で、コイル塞栓を行う場合

■ 製品規格表

セルリアン G40 (4Fr)

製品コード	品 番	チューブ外径		チューブ内径		先端形状	ソフトチューブ長		JAN コード
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)		(cm)	(cm)	
OB0936	AO40BG0.18G	1.40	0.055	1.02	0.040	ストレート	25	123	4543527178143
OB1054	AO40BG0.17G	1.40	0.055	1.02	0.040	ストレート	25	113	4543527188074

セルリアン G50 (5Fr)

製品コード	品 番	チューブ外径		チューブ内径		先端形状	ソフトチューブ長		JAN コード
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)		(cm)	(cm)	
OB0938	AO50BG0.18G	1.70	0.067	1.27	0.050	ストレート	25	123	4543527178167
OB1055	AO50BG0.17G	1.70	0.067	1.27	0.050	ストレート	25	113	4543527188081

販 売 名：メディキットガイディングカテーテル MH
 承認番号：21500BZZ00336000
 保険医療材料請求分類：ガイディングカテーテル (3) 脳血管用
 ※腹部四肢末梢用もごさい。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発 売 元：メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
 製造販売元：東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
 営 業 所／東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
 流通倉庫／宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>