

Supersheath[®]

NAVIGATOR



細径血管への2ステップパンクチャーを行うためのシースセット。



エコー視認性を向上させた21Gパンクチャー針で、エコーガイド下による血管アクセスをナビゲート。



溝加工部



21Gエコー針 先端



メディキット株式会社




Supersheath® NAVIGATOR

メディキットスーパーシース


3Frシースと21Gエコー針のシステムで、細径血管への2ステップパンクチャーを行うためのシースセットです。最初に21Gエコー針による穿刺で0.018inchガイドワイヤーを挿入し、3Frシース挿入後にガイドワイヤーを0.035inchまたは0.038inchサイズに入れ替え、治療用のシースを留置します。スーパーシースNAVIGATORは、シースとともに血管アクセスをナビゲートします。

製品概要

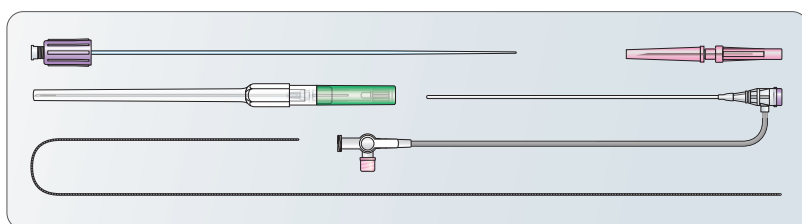


- 21Gエコー針(先端溝加工つき)
- 0.018 inch スプリングガイドワイヤー
- 3.0Fr シースイントロデューサー
- ダイレーター
- メス

製品特徴

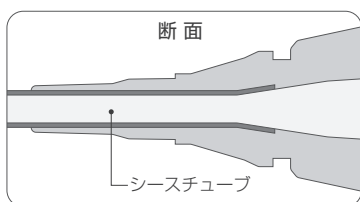


3.0Fr
シース

- シースのノウハウからストレスのないリリースを実現
- シースチューブと本体の一体成型によるGWのスムーズな挿入
- 透明な本体による視認性の向上

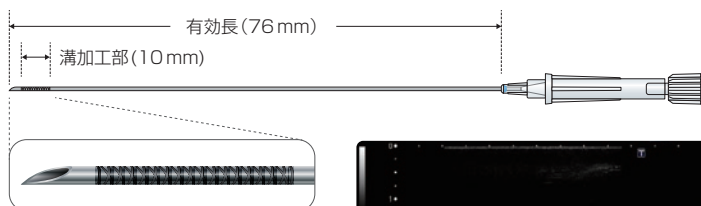

- 針側面の溝加工によりエコー視認性が向上
- 細径(21G)の針によるスムーズで切れの良い細血管への穿刺

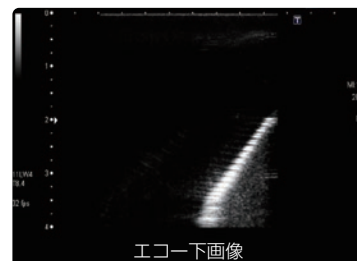

エコー下画像

製品規格

(5本/箱)

製品コード	営業品番	シース		パンクチャー針	ガイドワイヤー	JANコード
		サイズ	有効長			
IS1014	IS30Z11PSM(MP)	3.0Fr	11cm	21G(有効長76mm)	0.018" 40cm / スプリングタイプ	4543527199902

保険医療材料請求区分:血管造影用シースイントロデューサーセット(1)一般用 標準型 販売名:メディキットスーパーシース
医療機器承認番号:202008ZZ00114000

ご使用前に製品の電子添文を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発 売 元:メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
製造販売元:東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
営 業 所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
流通倉庫/宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>